




Test de un paso para HCV MERISCREEN (50 test)



MERISCREEN HCV es un ensayo inmunocromatográfico cualitativo basado en tecnología de flujo lateral para la detección de anticuerpos específicos contra la Hepatitis C (IgG, IgM e IgA) en suero/plasma humano o sangre total.

Materiales Provistos

- A. Dispositivos de prueba empacados de forma individual
- B. Tubos capilares
- C. Buffer de ensayo
- D. Inserto del producto

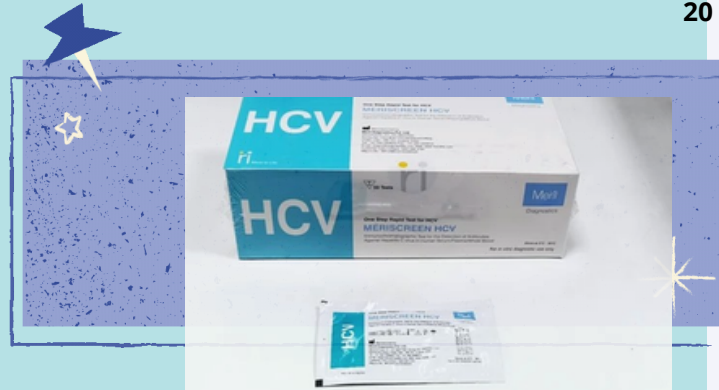


E. Inserto del dispositivo

Características

- Inmunoensayo de doble anticuerpo tipo sandwich
- Recubierto con Ag: Core NS3, NS4 y NS5
- Tipo de muestra: suero, plasma y sangre total
- Tiempo interpretación de resultados: 20 minutos
- Sensibilidad diagnóstica: > 99.5%
- Especificidad diagnóstica: >99.0%
- Almacenamiento: 2-30°C



Protocolo del test

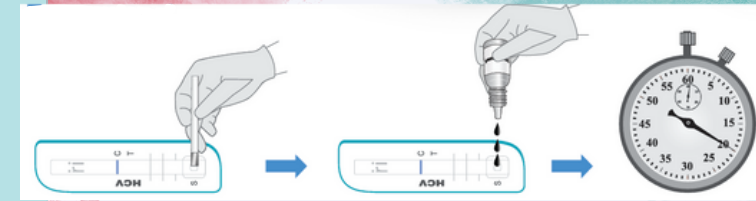


10 ul suero/plasma
20 ul sangre total

Añadir 3 gotas de
buffer

Lectura
resultados
20 minutos

Rapida y clara interpretacion de resultados

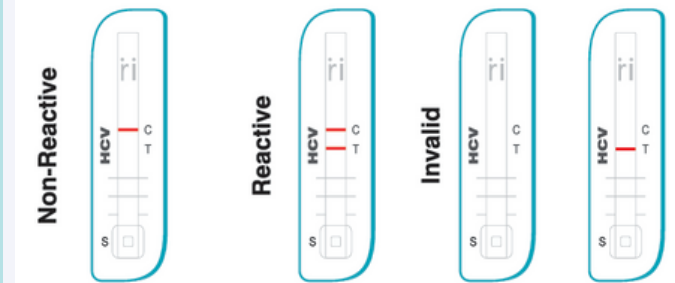

Control interno para máxima
seguridad en los resultados